

STRONG 210 mikromotor használata


Kidolgozó eszköz behelyezése a kézidarabba: a szerszámbefogó nyitásához illetve zárásához forgassa el az alábbi képen jelölt részt. Ügyeljen rá, hogy a kidolgozó eszközt, teljes mélységéig nyomja be a szorítópofába!


- Jelen kézidarab és pedál, csak a hozzá tartozó vezérlőegységgel együtt használható
- Csiszolófej méretei
 - ※Szár átmérő: 2.35mm (ISO7785-2 TYPE2)
 - ※Szár minimum hossza: 10mm
 - ※A csiszolófej rögzítése után a tokmányból kiálló rész teljes hossza ne haladja meg a 30 mm-t. Csak ISO minősítéssel rendelkező csiszolófejet használjunk.
- Ne használjunk rozsdás, illetve hajlott csiszolófejet, mert az kárt okozhat a csapágyakban.
- A csiszolófej cseréje előtt kapcsolja ki a készüléket.
- Vigyázzon, hogy ne ejtse le a kézidarabot mert az megsérülhet. Abban az esetben, ha mégis leesik, ellenőrizze, hogy a csiszolófej nem görbült-e meg, valamint, hogy használat közben tapasztal-e melegedést.
- Ha a kézidarab használatában bármilyen hibát tapasztal, úgy azt csak javítás után használja.
- Ne kapcsolja be a készüléket amíg a szorítópofa nyitott állásban van. (ez rövidzárat okozhat a motorban)
- Használat közben ne nyissa ki a szorítópofát.
- Ne tegye le a kézidarabot addig amíg az teljesen meg nem állt.



A vezérlő egység használata

- Ne használja a készüléket arra alkalmatlan illetve párás helyiségben.
- Először alacsonyabb fordulatszámon járassuk a motort, majd ha minden rendben növelhetjük a fordulatszámot.
- A fordulatszám szabályozót gyengéd mozdulatokkal forgassuk.
- 220-230V~/240V/ Biztosíték : 2A
- A tápegységet csak kikapcsolt állapotban csatlakoztassa a hálózati dugaljba.
- A motor túlterhelés elleni védelemmel van ellátva. Ez a funkció automatikusan bekapcsol ha a motor túl nagy terhelésnek van kitéve.
- A tápegység mozgatása előtt húzza ki a tápkábelt a dugaljból.
- A készüléket csak a beállított feszültségű villamos hálózaton használja.
- A pedál ON/OFF típusú, fordulatszám szabályozásra nem alkalmas.

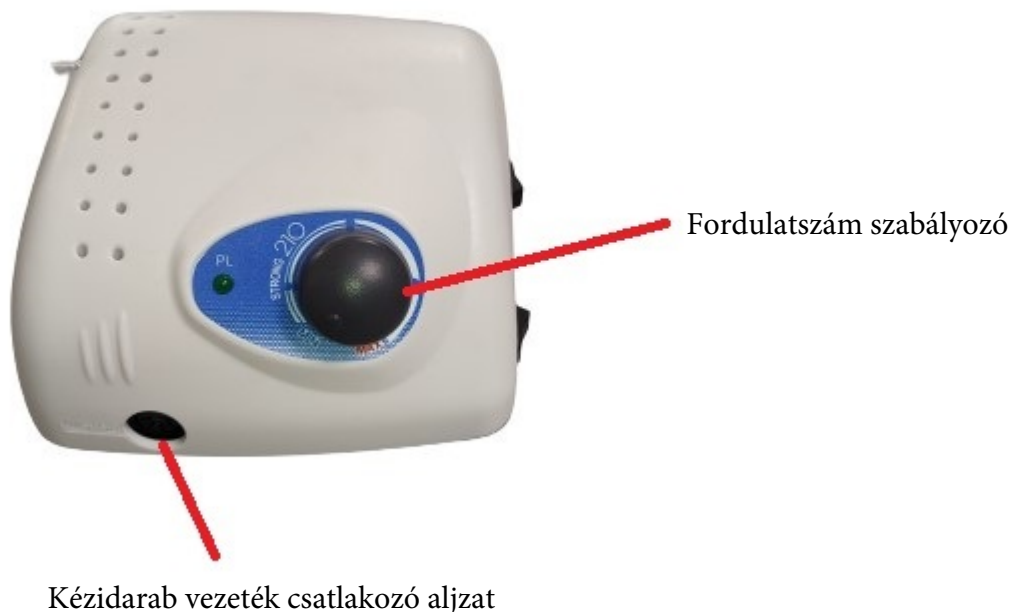

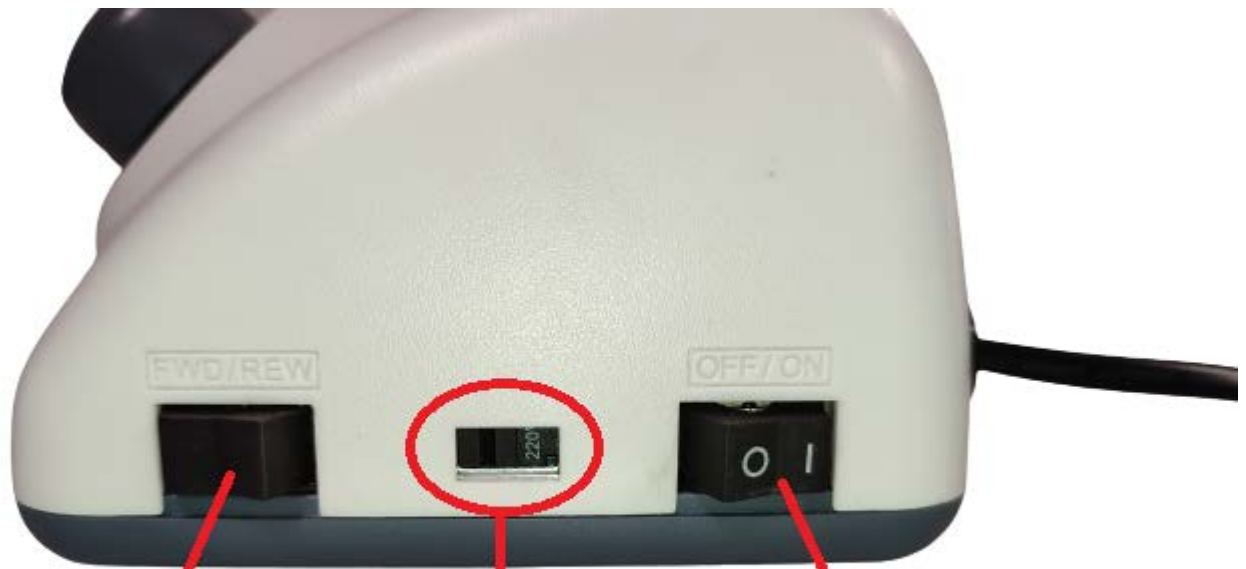

Forgásirány változtatása

Hálózati üzemmód *

Ki-be kapcsoló gomb

*: Ügyeljen rá, hogy ez a kapcsoló MINDIG 220V-os állásban legyen, ellenkező esetben a berendezés károsodhat.



Pedál vezeték csatlakozó aljzat

Váltás láb, illetve kézi üzemmód között