

## IMPACT FŐZŐACRYL

Győződünk meg arról, hogy eszközeink szennyeződés mentesek, és szobahőmérsékletűek.

**Ideális keverési arány:** 23,4 g por/ 10 ml folyadék

**Adagolás sorrendje:** először a folyadékot öntsük ki, utána adjuk hozzá a port

**Keverési idő** szobahőmérsékleten (23 C°): 50—60 másodperc

Keverés után 15 percig lefedve állni hagyjuk

Ezt követően szobahőmérsékleten további 30 percig megmunkálható az anyag.

### AJÁNLOTT MÓDSZER

#### Vékony (felső) fogsoroknál:

1. Küvettát tömés után vízben lassan felforralni (kb. 10 perc)
2. Forralás után a főzési idő minimum 22 perc
3. Főzés után levegőn 12 percig hűteni vízbe mártás előtt.

#### Vastag (alsó) fogsoroknál:

1. A küvettát tömés után a felforralt vízbe tenni, majd forrásba hozni. Kikapcsolva a gázt, a vízben 20 percig hűlni hagyni.
2. Lassan újraforralni (kb. 10 perc) és a forrás után 10 percig főzni
3. Főzés után levegőn 12 percig hűteni vízbe mártás előtt.

#### **Pegadent Bt.**

Budapest, 1046, Erkel Gyula u. 30.

Tel / Fax: 06 (1) 3709 777

Email: [info@pegadent.hu](mailto:info@pegadent.hu)

[www.pegadent.hu](http://www.pegadent.hu)

