

IMPACT ÖNTŐACRYL

Győződjünk meg arról, hogy eszközeink szennyeződés mentesek, és szobahőmérsékletűek (kb. 23 C°).

Ideális keverési arány: 5 g por/ 3,5 ml folyadék

Adagolás sorrendje: először a folyadékot öntsük ki, utána adjuk hozzá a port

Keverési idő : 30 másodpercig lassú, állandó keverés szobahőmérsékleten (23 C°)

Polimerizáció: 40 C° -on 2-3 BAR nyomás alatt, kb. 10 perc
Ezt követően szobahőmérsékleten további 8 percig megmunkálható az anyag.

MEGJEGYZÉS

Az izolálót meg kell szárítani és a maradék anyagot a küvettából el kell távolítani

Pegadent Bt.

Budapest, 1046, Erkel Gyula u. 30.

Tel / Fax: 06 (1) 3709 777

Email: info@pegadent.hu

www.pegadent.hu

