

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



1 A ház és a véső egy vonalban vannak



2 A rögzítőgyűrűt tolja előre, majd helyezze be a vésőfejet úgy, hogy a rögzítőgyűrű elengedése után a vésőfej előre-hátra szabadon mozogjon.



3 A perforált rész elforgatásával szabályozható a vésés intenzitása


CSATLAKOZTATÁS



KARBANTARTÁS



1 Síkosítsa a készüléket 4-5 csepp gépolajjal

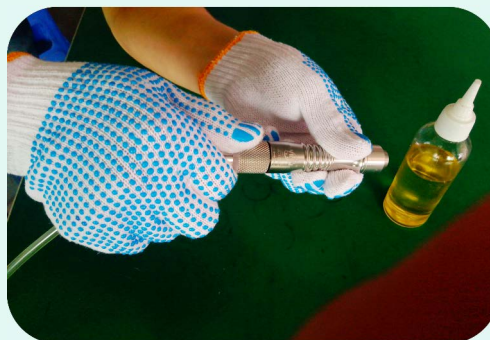

2 Kapcsolja be és járassa 10 másodpercig