

BMS015 – JAVÍTÓ AKRILÁT, ÖNKÖTŐ

BMS015 hidegen keményedő akrilát fogpótlásokhoz.

Nagy tisztaságú metakrilát műfogsorokhoz, jó mechanikai tulajdonságokkal.

Felhasználási javallatok:

Akrilátgyanta műfogsorok javításához és alábéleléséhez

Ellenjavallatok:

Nincs ellenjavallat, ha a helyes felhasználási módszert követik.

Felhasználás:

Öntsön 10 ml folyadékot 13 g porba és keverje össze 30 másodpercig szobahőmérsékleten, amíg az állaga el nem éri kívánt konzisztenciát.

Vigye fel az akrilátot a műfogsor felületére.

Távolítsa el a légbuborékokat a keverőtál vibráltatásával és/vagy polimerizálja forró vízben (50°C) nyomás alatt (2-2,5 Bar).

Megjegyzés: a buborékképződés kiküszöbölhető a nyomástartó edény használatával.

(pl. ha vastag műfogsorok vannak, vagy magas a külső hőmérséklet stb.)

Alkalmazás:

Keverési arány: 13 g por: 10 ml folyadék.

Keverési idő: kb. 30 másodperc.

Feldolgozási idő: kb. 2 perc

Kikeményedési idő: kb. 14 perc

Az összes időt 23 ± 2 °C hőmérsékleten számoltuk a keverési fázistól kezdve.

Megjegyzés: ne keverje a port és a folyadékot nyílt láng közelében.

Tárolás:

Az anyagot hűvös, száraz, jól szellőző helyen tárolja!

Kerülje a közvetlen napsütést és a hőt!

Ne lépje túl a 40°C környezeti hőmérsékletet.

Ezáltal a kémiai-fizikai tulajdonságok változatlanul maradnak az anyag lejárataig.

Önfelfűvási hőmérséklet: 421,1°C.

Használat után az anyagot mindig szorosan tartsa zárva!

Gyermekek elől elzárva tartandó!

Az anyagot a lejáratí idő után nem szabad felhasználni!

Biztonsági utasítások a folyadékhoz:

Nagyon gyúlékony, a terméket a nyíltlángtól távol kell tartani ,
ne dohányozzon a közelben!

A munkahelyet jól szellőztetve tartsa.

Irritálhatja a szemet, a légzőszerveket és a bőrt.

Szembe jutás után alaposan öblítse ki vízzel, és forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés után azonnal mossuk le bő szappanos vízzel.

A bőrrel való tartós érintkezés esetén irritációt okozhat, ezért a bőr védelmére kesztyű és védőszemüveg viselése javasolt.

Metil-metakrilátot tartalmaz.

Kapható: rózsa , erezett rózsa változatban

Kizárólag fogászati felhasználásra.

Kizárólag fogorvosok és fogtechnikusok általi használatra javasolt.