

Lustrol

HU

Használati útmutató



1. ábra



2. ábra

Páciens célcsoport

Olyan személyek, akik fogorvosi kezelésen vesznek részt.

Nem alkalmazható terhes / szoptató nőknél és gyermekeknél (a katalizátor komponens alkil-stanno-sziloxánt tartalmaz).

Rendeltetésszerű felhasználó

Fogtechnikus és fogorvos/ fogorvosnő

Előkészítés

A folyékony politúr felvitele előtt az alábélelt protézis bázisának és funkciós széleinek teljesen tisztának és száraznak kell lenni!

Keverés

Adagoljon fénylakkot és katalizátort az adagolási útmutatónak megfelelően egy keverőblokkra, vagy üveglapra. Keverje össze egyenletesre a két komponenst (1. ábra).

Applikálás

Vékony ecsettel vékonyan vigyen fel Lustrolt az utólag megmunkált helyekre és hagyja száradni 15-20 percre (2. ábra).

Rendeltetési cél:

Szilikon fénylakk meghatározott szilikon alábélelésekhez

Indikáció:

Szilikon alapú fénylakk, Permaliner, Molloplast® B- & mollosil® alábélelések lezárásához és simításához

Bekeverési idő:

½ perc

Kötési idő:

20 perc, a keverés kezdésétől

Adagolás:

1 csepp Lustrol fénylakk: 1 csepp katalizátor

Feldolgozás:

23 °C, 50 ± 5% rel. páratartalom

Tárolás:



Rendelési információk:

Lustrol

Alapcsomag

Fénylakk, 6 ml flakon
Katalizátor, 6 ml flakon
Pipetta feltét 2 db

03008

Biztonsági útmutatások

- Csak a megadott célra használható, képzett szakszemélyzet által.
- A nem kötött anyag megmunkálásánál személyi védőfelszerelést kell használni (védőkesztyű, védőszemüveg).
- A megkötött anyag utómunkálatainál ennek megfelelően alkalmas személyi védőfelszereléseket (védőkesztyű, védőszemüveg, maszk) kell viselni.
- Kerülje a katalizátor szembe jutását, szükség esetén azonnal alaposan öblítse ki folyó vízzel és azonnal forduljon szemorvoshoz.
- Ne lélegezze be a gőzöket.
- Tartsa távol gyújtóforrástól.
- A veszély-, és biztonsági útmutatásokat a megfelelő biztonsági adatlapon találja.

Útmutatások

- A DETAX nem vállal felelősséget a lenyomatvételi anyag hibás használat által okozott károkért.
- A felnyitás után és az adagoláshoz használjon pipetta feltétet.
- Mindig jól lezárva tárolja.
- Vegye figyelembe a biztonsági adatlapot!

A felhasználó és/vagy a páciens számára:

Az ezzel a termékkel kapcsolatosan előfordult összes súlyos esetet haladéktalanul jelenteni kell a incident@detax.de címen, valamint a felhasználó és/vagy a beteg letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

Ellenjavallatok

Ne használja az anyagot, ha ismert allergia, vagy kontakt allergia áll fenn valamelyik összetevő ellen. Nem kívánt hatás szakszerű használat esetén nem várható. Azonban alapvetően nem zárható ki olyan immunreakciók, mint pl. allergia, irritáció. Bizonytalanság esetén azt javasoljuk, hogy az alkalmazás előtt készíttessen allergiatesztet.

Leselejtezés

A tartalom/az edény leselejtezését a helyi/regionális/országos és nemzetközi előírásoknak megfelelően végezze el.

Szimbólumok magyarázata

MD Orvosi termék